

广告审查准予许可决定书

琼械广审准许字[2026]第 000268 号

海南海康诺德医疗器械有限公司：

我局于 2026 年 06 月 23 日 受理你（单位）提交的 医疗器械 广告审查申请。产品名称（商品名称）为 藻酸盐复制材料，产品注册证明文件或者备案凭证编号为 琼海口械备 20210007，持有人为 海南海康诺德医疗器械有限公司。

经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国广告法》、市场监管总局《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》等法律和规章规定，我局决定批准你（单位）的申请，编发广告批准文号：琼械广审（文）第 280623-00277 号，有效期限至 2028 年 06 月 23 日。

如对本决定书持有异议的，可以自收到本决定书之日起六十日内依据《中华人民共和国行政复议法》的规定，向海南省人民政府申请行政复议，也可以自收到本决定书之日起六个月内依据《中华人民共和国行政诉讼法》的规定，直接向人民法院提起行政诉讼。

附：广告样件

海南省广告审查机关

2026 年 07 月 06 日

升级配方体验

PATENT
PROTECTED DESIGN

适配规范化印模流程的『伴口藻酸盐』

（细节可见）
（质地Q弹）

印模材小包装

广泛应用于口腔医疗机构

干净卫生，避免交叉感染。独立包装设计，助力科室清晰划分成本，实现精细化管理。

海康诺德 Hicano®

藻酸盐印模材料

Alginate Impression material

伴口

标准化用量

高效稳定 操作更从容

新手也能轻松操作

EASY TO HANDLE
SUITABLE FOR NEW USERS

用量恰到好处

度

分为2种型号包装
中(M)号和大号(L)

M中号14g/包
适配小号托盘 / 适用于青少年标准半口

L大号18g/包
适配大号托盘 / 适用于成人标准半口

全口印模：两袋足量，轻松覆盖

临床操作中，这些细节难题，是否常常让您困扰？

边缘不清
就位困难，贴合度差，咬合关系易失真。

取模变形
牙模整体变形，表面模糊，咬合关系失真。

模型脱粉
印模材受潮，表面粉化，细节丢失，影响模型精度。

效率低
水粉配比无统一标准，依赖经验调拌，易导致反复加水、材料浪费，成本难以精准控制。

伴口® 藻酸盐印模材

减少模糊与变形现象、反复调拌
旨在提升取模操作的顺畅感与效率

较好呈现牙齿细节特征，还原清晰边缘形态
关注临床操作中的常见痛点

边缘细节易辨识

弹性良好 尺寸稳定

调拌顺畅 无气泡

独立包装 卫生定量

粉水比	调和时间		调和水温	固化时间
	手调	机调		
10g: 23ml	15s-20s	10s	21 ±2°C	110S

14g粉剂建议加 30-31ml 水（喜欢稠一点选30ml，喜欢稀一点选31ml）。
18g粉剂建议加 35ml 水。具体加多少水，您可以根据手感和临床需求自由掌控。

伴口® 藻酸盐印模材

用智慧复制每一颗牙齿的印迹

印模材这么多，为什么要选择伴口藻酸盐印模材？

01 天然海藻提取 细节分毫毕现

优选原料，助力精准操作

严选全球无污染海域的海藻提取物为主要成分之一，经检测符合相关安全标准，确保成分纯净稳定，易于保存。它不仅拥有出色的弹性与抗压强度，更能快速回弹、不易变形；同时抗撕裂性能优异，有效减少取模失误，对患者温和无刺激，从源头杜绝过敏风险，是一款真正安全、高效的印模材料。

02 粉质细腻均匀 适应牙齿自然形态

粉质大小均匀，粒度细

印模细节还原度高，边缘形态表现优异。

03 独立铝箔小包装设计

防潮又方便

单次定量独立包装，防潮避光，随取随用，干净卫生。有效避免材料浪费，为您节省时间与成本。

04 翻盖式彩盒设计

取用更顺手

创新翻盖结构，一开即取，轻松拿取独立小包。单手即可操作，提升诊室备物效率，时刻保持材料洁净。

一类医疗器械备案

规范备案 品质如一

包装已获外观专利认证

THE PACKAGING HAS BEEN CERTIFIED BY THE APPEARANCE PATENT

外观专利证书

第一类医疗器械备案凭证

第一类医疗器械备案凭证

产品参数

用智慧复制每一颗牙齿的印迹

37.3CM
17CM
12CM

手工测量尺寸，可能会有±0.2误差

产品名称：
伴口藻酸盐印模材料

品牌：
海康诺德

有效期：
36个月

适用范围：
供口腔医生及技工室用于复制印模（制取口腔阴模）

产品规格：
中号（M）14g/包*66包/盒，924g/盒
大号（L）18g/包*51包/盒，918g/盒

注意事项：
① 仅供一次性使用，超过有效期不能使用。
② 应由医务工作人员进行使用本产品，使用产品前应阅读产品说明书。

高清晰度

藻酸盐印模材

{印模精细}
{调拌均匀丝滑}
{弹性优异 尺寸稳定}



牙科藻酸盐印模材料

印模材一分钟了解

(为什么我们的印模材细节表现优异?)
精细均匀的颗粒结构，能够精准捕捉口腔微小细节，提升修复体边缘密合度。凝固后呈现高辨识度的橙色，符合临床操作主流习惯，形态直观清晰。

(我们这款印模材好在哪里呢?)
海康诺德的这款印模材粉质细腻均匀，细节复制能力好，符合高标准要求，细节分辨率高，具备优异的弹性恢复性能，抗压抗撕裂强度高，不易变形。

(谁是我们专业的合作伙伴)

口腔技工室，临床使用（特别适合高精度种植、贴面及嵌体模型制作）。

(为什么众多牙医选择反复回购?)

海康诺德的老用户都知道，我们的每一款产品都是基于临床医生的实际痛点自主研发的。上市后，我们会投入大量精力追踪用户的真实反馈，无论是认可还是建议。因为我们深知，产品总有提升空间，及时倾听并快速响应，不断打磨迭代，是交付优质体验的关键。正因如此，我们的产品才能真正解决口腔临床的实际问题，一经上市便广受好评，赢得了众多医生的信赖与复购。

ORAL CLINICAL PRODUCTS ▲ TECHNOLOGY ▲ INNOVATE

四维产品特性

优质稳定

(细)流动性好

精细研磨，粉质细腻。
调拌均匀丝滑，易搅拌。

(精)高精型

是一款高精度藻酸盐印模材，高精细度更加有利于印模细节的重视，使得所有修复诊断更加精准，减少技工所返修率。
修复体最终结果更精准

(清)超清晰

印模材为粉色粉末，材料凝固后变为橙色，牙齿形态清晰可见。
颜色亮丽，印模清晰。

(弹)高弹性

由于出色的弹性恢复和抗撕裂性在灌取模型时有出色的细节重现。
复刻细节，精细度高

精密防潮封口

确保粉质恒久干爽



产品主要性能

水粉比	搅拌时间（秒）	
	手调	机调
23ml:10g	15-20s	10s
调和水温	固化时间	流动性指标
~21±2°C	~110s	☆☆☆☆☆

正确使用

才能事半功倍

step 1	step 2	step 3
严格按 10 g 粉 :23ml常温水（去离子水）精准配比，使用专用工具单向缓慢搅拌 15-20秒至丝滑无颗粒，避免混入气泡。	推荐使用真空搅拌机，约10秒内即可实现高均匀度混合，让操作更高效。	灌模前务必清除印膜内残留水分与杂物，确保模型表面光洁、硬度达标。

注意：水温过高会加速反应导致操作时间缩短，请根据环境温度适当调整。

注意事项

》》》 MATTERS NEED ATTENTION 《《《

①**精准配比，严控时间**：材料品质直接决定模型的高精度还原度。请务必严格按照产品说明，准确控制粉水比例与调和时间，为后续工作奠定良好基础。

②**均匀调拌，排除气泡**：调拌时应确保粉水比例合适、混合均匀。建议从高点处轻轻振荡，或使用“单侧向双侧灌注法”，有效避免气泡存留与模型空洞，保障成品质量。

③**控制速度，保障强度**：调拌速度切忌过快。高速搅拌不仅会产生大量气泡，还会促使结晶中心过多形成，容易降低材料的终末强度。

④**避湿保存，防止变性**：藻酸盐印模材料对湿度敏感，暴露于空气中（尤其在湿度较大的环境下）极易发生变性，使用后请务必密封保存。印模材料产品易变性。

产品信息

品牌：海康诺德 **产品名称：**伴口藻酸盐复制材料

产品成分：采用藻酸盐牙科石膏等制成 **有效期：**36个月

产品颜色：粉色粉末，凝固后变成橙色 **产品规格：**908g/罐，6罐/件

外箱尺寸及毛重：40.4长*27宽*22.4高(cm)，6kg/件

预期用途：本产品用于制作牙科模型（阴模）

